

Probenversand zur histologischen Untersuchung



Fixation

- Fixation in 10% gepuffertem Formalin (ergibt 4%ige Formaldehydlösung)
- Sehr kleine Proben evtl. in Kapsel zwischen 2 Schwämmchen (Beispielbild). Achtung Probe nicht quetschen!
- Sehr grosse Proben zur besseren Fixierung evtl. einschneiden (nicht komplett durchschneiden).



Verpackung: Bruch- und auslaufsicher

1. Dichtes weithalsiges, bruchsicheres und auslaufsicheres Gefäss
2. Saugfähiges Material
3. Dichtes bruchsicheres und auslaufsicheres Gefäss



Versandbox: Stoss- und auslaufsicher

- Antragsformular
- Füllmaterial
- Adressieren plus **UN 3373** Etikett
- Absenderadresse