

Envoie d'échantillon pour examen histologique



Fixation

- Fixation dans de la formaline 10% tamponnée (engendre une solution de formaldéhyde 4%)
- En cas d'échantillons très petits, evt. emballer dans une capsule avec 2 petites éponges (voir image). Attention: ne pas écraser l'échantillon!
- En cas d'échantillons très grands, entaillez-le(s) pour permettre une meilleure fixation (ne pas le(s) couper en deux).



Emballage: Etanche et résistant aux chocs

1. Récipient étanche, à col large et résistant aux chocs.
2. Matériau absorbant
3. Récipient étanche et résistant aux chocs



Boîte de transport: Etanche et résistante aux chocs

- Formulaire de demande
- Calage/matériau de rembourrage
- Ajouter l'adresse, une étiquette **UN 3373** et l'adresse d'envoyeur